

JUVÉDERM® | LABIOS



Paciente real.
Los resultados
pueden variar.

JUVÉDERM® ULTRA XC

JUVÉDERM® VOLBELLA® XC

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM®

USOS APROBADOS

El gel inyectable JUVÉDERM® VOLUMA® XC se aplica como una inyección profunda en la zona de la mejilla para corregir la pérdida de volumen relacionada con la edad, para aumentar la región del mentón con el fin de mejorar el perfil del mentón, y para aumentar la región de las sienes con el fin de mejorar el hundimiento de moderado a intenso de las sienes en adultos mayores de 21 años.

El gel inyectable JUVÉDERM® VOLUX® XC se aplica como una inyección profunda para mejorar la pérdida de definición de la mandíbula de moderada a intensa en adultos mayores de 21 años.

Los geles inyectables JUVÉDERM® VOLLURE® XC, JUVÉDERM® Ultra Plus XC y JUVÉDERM® Ultra XC se inyectan en el tejido facial para la corrección de arrugas y pliegues faciales de moderados a profundos, como los pliegues nasolabiales. El gel inyectable JUVÉDERM® VOLLURE® XC es para adultos mayores de 21 años.

El gel inyectable JUVÉDERM® Ultra XC también se aplica en los labios y en la zona peribucal a fin de aumentar el volumen de los labios en adultos mayores de 21 años.

El gel inyectable JUVÉDERM® VOLBELLA® XC es para inyectar en los labios a fin de aumentar el volumen de estos y corregir las líneas peribucles. También se inyecta debajo de los ojos para mejorar el aspecto de las ojeras en adultos mayores de 21 años.

Consulte la Información importante de seguridad en el interior.



Pacientes reales.
Los resultados pueden variar.

SUS LABIOS. SU LOOK.

**LABIOS QUE SE VEN
NATURALMENTE MÁS
VOLUMINOSOS CON
JUVÉDERM®**

JUVÉDERM®
COLLECTION OF FILLERS



¿Busca formas de realzar los labios con volumen añadido? Su caso no es el único: los labios son el área tratada con mayor frecuencia entre todos los pacientes que reciben rellenos de ácido hialurónico (AH).*

JUVÉDERM® puede ayudarle a conseguir unos labios con mayor volumen y aspecto natural que desea.

*Basado en los registros de dosificación de rellenos en pacientes de 2024 (n = 1138).

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Hay alguna razón por la que no debería recibir una formulación de JUVÉDERM®?

No use estos productos si tiene antecedentes de alergias graves múltiples o reacciones alérgicas graves (anafilaxia), si tiene alergia a la lidocaína o a las proteínas bacterianas grampositivas utilizadas en estos productos o si anteriormente tuvo una reacción alérgica a los rellenos de ácido hialurónico.

¿Sobre qué advertencias debería informarme mi médico?

- Uno de los riesgos del uso de rellenos dérmicos es la inyección involuntaria en un vaso sanguíneo. Las posibilidades de que esto ocurra son muy pequeñas, pero si sucede, las complicaciones pueden ser graves y permanentes. Estas complicaciones, que se han informado sobre inyecciones faciales, pueden incluir anomalías de la visión, ceguera, accidente cerebrovascular, costras temporales o cicatrices permanentes de la piel. La mayoría de estos eventos son irreversibles.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.

DEFINA SUS OBJETIVOS PARA LOS LABIOS CON UNA EVALUACIÓN



**Información importante sobre los rellenos de gel inyectable
JUVÉDERM® (continuación)**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Sobre qué advertencias debería informarme mi médico? (continuación)

- Si experimenta cambios en su visión, signos de un accidente cerebrovascular (incluidas dificultad repentina para hablar, entumecimiento o debilidad en cara, brazos o piernas, dificultad para caminar, caída de la cara, dolor de cabeza intenso, mareos o confusión), aspecto blanco de la piel o dolor inusual durante el tratamiento o poco después de él, debe notificarlo inmediatamente a su profesional de atención de la salud.
- Debe posponerse el uso de rellenos dérmicos si se presentan llagas, granos, erupciones cutáneas, urticaria, quistes o infecciones en la piel, ya que puede retrasar la curación o empeorar los problemas cutáneos.
- No se ha estudiado la eficacia de la eliminación de ningún relleno dérmico.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.

- Mantenga una conversación abierta y sincera con su especialista en estética sobre sus objetivos para los labios.
- Su especialista evaluará los labios y la cara para determinar qué se verá proporcional en función de sus facciones únicas.
- Trabajarán juntos para diseñar un plan de tratamiento adaptado a sus objetivos y a su aspecto individual.



Pacientes reales.
Los resultados pueden variar.



JUVÉDERM® ULTRA XC

Labios con volumen y aspecto natural por un máximo de 1 año*

Paciente real. Los resultados pueden variar.

2 PRODUCTOS. RESULTADOS PERSONALIZADOS.

Estos 2 rellenos de AH inyectables distintos se han diseñado para ofrecer resultados instantáneos que se ajusten a sus objetivos.

- **JUVÉDERM® Ultra XC** añade volumen a los labios para mejorar temporalmente el relleno de los labios
- **JUVÉDERM® VOLBELLA® XC** añade volumen a los labios temporalmente y suaviza la apariencia de las líneas alrededor de la boca



JUVÉDERM® VOLBELLA® XC

Labios suaves y sutiles por un máximo de 1 año*

Paciente real. Los resultados pueden variar.

LOS RESULTADOS SON INSTANTÁNEOS Y DURAN HASTA 1 AÑO.*

*Con tratamiento óptimo.

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico?

- Solo los médicos que hayan completado la formación necesaria para esta área de tratamiento pueden inyectar JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en las ojeras. Para encontrar un médico, visite Juvederm.com/find-a-specialist. Los médicos que completen el formación aparecerán con un símbolo
- No se ha estudiado la seguridad de estos productos para su uso durante el embarazo o la lactancia.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.



Paciente real. Los resultados pueden variar.

La trayectoria de Sthefani con JUVÉDERM®

SUAVE Y ELEGANTE

Edad

30 a 39 años

Profesión

Creadora de contenido

“Me encanta el aspecto que tienen mis labios en las fotos, y el mentón se adapta a la forma natural de mi cara”.

4 productos JUVÉDERM® diferentes, 5 áreas tratadas en total

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico? (continuación)

- La seguridad de JUVÉDERM® VOLUMA® XC no se ha estudiado en pacientes menores de 35 años o mayores de 65 años para el aumento de volumen de las mejillas, o en menores de 22 años y mayores de 80 años para el aumento de volumen del mentón, ni en menores de 32 años o mayores de 82 años para el aumento del área de las sienes. La seguridad de JUVÉDERM® VOLUX® XC, JUVÉDERM® VOLLURE® XC y JUVÉDERM® VOLBELLA® XC no se ha estudiado en pacientes menores de 22 años, y la seguridad de JUVÉDERM® Ultra Plus XC y JUVÉDERM® Ultra XC no se ha estudiado en pacientes menores de 18 años.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.



Antes del tratamiento

Comience con una evaluación de toda la cara



Después del tratamiento de cara completa

- 0.7 ml de JUVÉDERM® ULTRA XC en los labios
- 3.3 ml de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en las mejillas
- 2.0 ml de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en el mentón
- 1.0 ml de JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en las ojeras
- 2.0 ml de JUVÉDERM® VOLLURE® XC en las líneas de la sonrisa

Total: 9.0 ml



Antes del tratamiento de labios

Después del tratamiento de labios



Paciente real. Los resultados pueden variar.

La trayectoria de Juliette con JUVÉDERM®

MÁS VOLUMEN Y NATURALES

Edad

20 a 29 años

Profesión

Directora de membresía

“Mis labios se ven tal como me los había imaginado, suaves y naturalmente más voluminosos, y tengo un aspecto general muy chic”.

3 productos JUVÉDERM® diferentes, 4 áreas tratadas en total

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico? (continuación)

- No se ha establecido en estudios clínicos la seguridad y eficacia del tratamiento con los productos JUVÉDERM® en regiones anatómicas fuera de sus usos aprobados.
- Si tiene antecedentes de formación excesiva de cicatrices (cicatrizaciones gruesas y duras) o trastornos de pigmentación, el tratamiento de estos pacientes no se ha estudiado y puede provocar cicatrices adicionales o cambios en la pigmentación.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.



Antes del tratamiento

Comience con una evaluación de toda la cara



Después del tratamiento de cara completa

- 0.9 ml de JUVÉDERM® ULTRA XC en los labios
- 3.0 ml de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en las mejillas
- 0.6 ml de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en el mentón
- 0.3 ml de JUVÉDERM® VOLLURE® XC en las líneas de la sonrisa

TOTAL: 4.8 ml



Antes del tratamiento de labios

Después del tratamiento de labios



Paciente real. Los resultados pueden variar.

La trayectoria de Matt con JUVÉDERM®

DEFINIDO Y ESTRUCTURADO

Edad

40 a 49 años

Profesión

Conductor de un podcast

“Mi mandíbula está más definida y mis labios están realzados. La estructura de la mandíbula se ve más masculina”.

3 productos JUVÉDERM® diferentes, 6 áreas tratadas en total

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico? (continuación)

- Si está planificando otros procedimientos que incluyen tratamientos con láser o una exfoliación química, existe un posible riesgo de inflamación en el lugar del tratamiento si estos procedimientos se realizan muy cerca antes o después del tratamiento con gel inyectable JUVÉDERM®.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.



Antes del tratamiento

Comience con una evaluación de toda la cara



Después del tratamiento de cara completa

JUVÉDERM® VOLUMA® XC

- 4.1 ml en las mejillas
- 1.0 ml en el mentón*
- 2.0 ml en las sienes

• 1.5 ml de JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en los labios

• 1.2 ml de JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en las ojeras

• 5.0 ml de JUVÉDERM® VOLUX® XC en la mandíbula

TOTAL: 14.8 ml



Antes del tratamiento de labios

Después del tratamiento de labios

*En el estudio clínico de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en el mentón, la medida principal del éxito del estudio clínico no se alcanzó en pacientes varones, aunque su satisfacción fue alta de todos modos.



Paciente real. Los resultados pueden variar.

La trayectoria de Jesse con JUVÉDERM®

COOL Y REFINADO

Edad

30 a 39 años

Profesión

Instructor personal

“Mi mandíbula está más definida y estoy satisfecho con el aspecto de mi mentón y mis labios. Me encanta cuánto durarán mis resultados”.

4 productos JUVÉDERM® diferentes, 7 áreas tratadas en total

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico? (continuación)

- Informe a su médico si está recibiendo terapia para reducir el sistema de defensa natural de su cuerpo (como esteroides, quimioterapia y medicamentos para tratar enfermedades autoinmunes, VIH y sida), ya que estos pueden aumentar su riesgo de infección, y si está recibiendo medicamentos que pueden prolongar el sangrado (como aspirina, ibuprofeno u otros anticoagulantes), ya que pueden provocar un aumento en moretones o en sangrado en el lugar de inyección.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.



Antes del tratamiento

Comience con una evaluación de toda la cara



Después del tratamiento de cara completa

JUVÉDERM® VOLUMA® XC

- 3.0 ml en las mejillas
- 1.0 ml en el mentón*
- 4.0 ml en las sienes

- **0.4 ml de JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en los labios**
- 0.4 ml de JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en las ojeras
- 6.0 ml de JUVÉDERM® VOLUX® XC en la mandíbula
- 0.4 ml de JUVÉDERM® VOLLURE® XC en las líneas de la sonrisa

Total: 15.2 ml



Antes del tratamiento de labios

Después del tratamiento de labios

*En el estudio clínico de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en el mentón, la medida principal del éxito del estudio clínico no se alcanzó en pacientes varones, aunque su satisfacción fue alta de todos modos.



Paciente real. Los resultados pueden variar.

La trayectoria de Aleksandra con JUVÉDERM®

LISO Y DELICADO

Edad

50 a 59 años

Profesión

Maestra

“Mis labios tienen una forma naturalmente más voluminosa y estoy muy satisfecha con mis resultados”.

4 productos JUVÉDERM® diferentes, 6 áreas tratadas en total

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico? (continuación)

- Evite maquillarse durante 12 horas después del tratamiento y minimice el ejercicio extenuante, evite la exposición al sol o al calor intensos y las bebidas alcohólicas en las primeras 24 horas después del tratamiento, ya que pueden causar enrojecimiento temporal, hinchazón y/o picor en el lugar de inyección.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.



Antes del tratamiento

Comience con una evaluación de toda la cara



Después del tratamiento de cara completa

JUVÉDERM® VOLUMA® XC

- 4.5 ml en las mejillas
- 2.2 ml en el mentón*
- 2.0 ml en las sienes

TOTAL: 13.6 ml

- **1.0 ml de JUVÉDERM® VOLBELLA® XC en los labios**
- 2.0 ml de JUVÉDERM® VOLUX® XC en la mandíbula
- 1.9 ml de JUVÉDERM® VOLLURE® XC en las líneas de la sonrisa



Antes del tratamiento de labios

Después del tratamiento de labios

*En el estudio clínico de JUVÉDERM® VOLUMA® XC en el mentón, la medida principal del éxito del estudio clínico no se alcanzó en personas de 51.5 años de edad o más. Sin embargo, la satisfacción fue alta de todos modos entre estos sujetos.

QUÉ ESPERAR EN LA EXPERIENCIA DEL TRATAMIENTO DE LOS LABIOS

¿CÓMO ES LA CONSULTA?

Su especialista en estética revisará su historial médico y proporcionará una evaluación integral. Prepárese para hablar de sus objetivos estéticos para los labios y otras áreas de la cara. El tratamiento con los geles inyectables JUVÉDERM® suele durar entre 15 y 60 minutos, dependiendo de qué zonas se estén tratando.

¿CUÁNTO DURARÁN MIS RESULTADOS EN LOS LABIOS?

Para JUVÉDERM® Ultra XC y JUVÉDERM® VOLBELLA® XC, los resultados duran hasta 1 año con un tratamiento óptimo. Es importante tener en cuenta que el tratamiento con los rellenos JUVÉDERM® no es permanente.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?

Los efectos secundarios más frecuentes fueron hinchazón, sensibilidad, moretones, dureza, bultos/protuberancias, enrojecimiento, dolor, cambio de coloración, picazón y sequedad. Minimice el ejercicio, la exposición al sol o al calor y las bebidas alcohólicas en las primeras 24 horas después del tratamiento para evitar el empeoramiento de estos efectos secundarios. Hable con su especialista en estética autorizado sobre las instrucciones de cuidado luego del tratamiento, incluyendo cuándo se puede aplicar maquillaje después del tratamiento, y consulte la **Información importante de seguridad** a lo largo de este folleto.

DESCUBRA CÓMO GANAR RECOMPENSAS Y AHORRAR EN SU TRATAMIENTO CON JUVÉDERM® EN ALLE.COM

COMIENZE HOY MISMO

Acuda a una consulta con su especialista en estética para determinar si el tratamiento es adecuado para usted.

Iniciadores de conversación útiles para una consulta eficaz:

- ✓ “¿Qué productos JUVÉDERM® son las mejores opciones según mis objetivos para los labios?”
- ✓ “¿Algunos productos duran más que los otros?”
- ✓ “¿Durante mi cita, cómo decide qué áreas tratar?”
- ✓ “¿Cómo puedo lograr resultados de aspecto natural en mi trayectoria con JUVÉDERM®?”
- ✓ “¿Cómo determinamos qué rellenos de JUVÉDERM® son mejores para mí?”

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué precauciones debería informarme mi médico? (continuación)

- JUVÉDERM® VOLUMA®XC no se ha estudiado en pacientes con piel significativamente flácida en el mentón, el cuello o la mandíbula.
- No se ha estudiado el efecto de la inyección de JUVÉDERM® VOLUMA® XC sobre el crecimiento del vello facial en el mentón.
- Los pacientes que sufren daños cutáneos cerca del lugar de la inyección de JUVÉDERM® VOLUMA® XC pueden tener un mayor riesgo de eventos adversos.
- Informe a su médico si ya le han inyectado rellenos dérmicos en la misma zona por la que está a punto de recibir tratamiento. Esta información ayudará a su médico a decidir cuándo y si debe recibir tratamiento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento?

Los efectos secundarios notificados con mayor frecuencia con los geles inyectables JUVÉDERM® fueron enrojecimiento, hinchazón, dolor, sensibilidad, durezas, bultos/protuberancias, moretones, decoloración y picor. Para JUVÉDERM® VOLBELLA® XC, también se notificó sequedad.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se encuentra en las siguientes páginas.

SU TRAYECTORIA CON JUVÉDERM® ADEMÁS DE LOS LABIOS



*Basado en los datos de una encuesta realizada a proveedores de atención médica en octubre de 2024 (N = 870).

†Basado en una encuesta de noviembre de 2022 de mujeres reclutadas de paneles de investigación de mercado que recibieron tratamiento con rellenos en los últimos 2 años (n = 98).

1 Colección. 6 Productos. 10 Aprobaciones de la FDA.

La colección JUVÉDERM® ofrece una gama de 6 rellenos diseñados específicamente teniendo en cuenta su rostro para ayudarle a alcanzar sus objetivos estéticos faciales.

#1

elegida*
solicitada†
marca de rellenos recomendada
por pacientes‡ y proveedores§



*Entre las marcas líderes en rellenos, según los datos de encuestas recopiladas de enero a abril de 2023, el 70 % de las mujeres tratadas en el último año con un relleno de JUVÉDERM® probablemente lo recomendaría a amigos interesados en rellenos dérmicos (n = 356).

†Entre las marcas líderes, según los datos de encuestas recopiladas de febrero a abril de 2023, es probable que el 64 % de los proveedores de atención médica que utilizan rellenos de JUVÉDERM® en su consulta lo recomienden a sus colegas (n = 747).

UNA MIRADA COMPLETA A JUVÉDERM®

Resultados suaves, naturales e instantáneos con la Colección JUVÉDERM®.

Labios

JUVÉDERM® ULTRA XC

Rellenar los labios

Los resultados duran hasta **1 año***

JUVÉDERM® VOLBELLA XC

Acentuar los labios y suavizar las líneas de los labios

Los resultados duran hasta **1 año***

Contorno

JUVÉDERM® VOLUMA XC

Voluminizar las mejillas para levantarlas

Los resultados duran hasta **2 años***

Dar contorno al mentón

Los resultados duran hasta **1 año***

Dar volumen a las sienes para levantarlas

Los resultados duran más de **1 año***

JUVÉDERM® VOLUX XC

Redefinir la mandíbula

Los resultados duran hasta **1 año***

Líneas de la sonrisa

JUVÉDERM® VOLLURE XC

Suavizar las líneas

Los resultados duran hasta **18 meses***.

JUVÉDERM® ULTRA PLUS XC

Rellenar las líneas

Los resultados duran más de **1 año***

Ojeras

JUVÉDERM® VOLBELLA XC

Mejorar la apariencia de las ojeras

Los resultados duran hasta **1 año***

*Con tratamiento óptimo.

Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento? (Continuación)

Estos efectos secundarios son coherentes con otros procedimientos de inyección facial y la mayoría se resolverán en un plazo de 30 días. Su médico puede decidir tratar los efectos secundarios que persistan por más tiempo con antibióticos, esteroides o hialuronidasa (una enzima que descompone el ácido hialurónico).

Al igual que con todos los procedimientos de inyección en la piel, existe el riesgo de infección.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en la parte de atrás.


Contorno



Labios



Líneas de la sonrisa

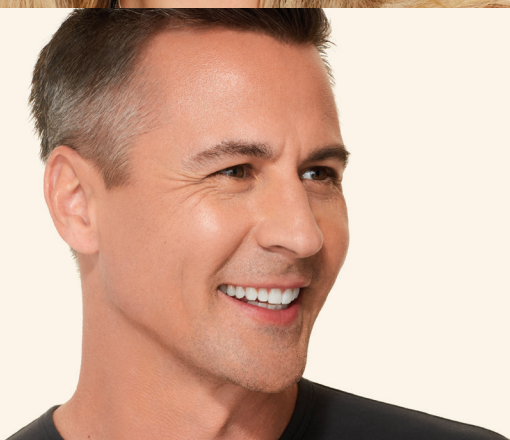

Ojeras



Pacientes reales.
Los resultados
pueden variar.

JUVÉDERM®

COLLECTION OF FILLERS

JUVÉDERM.COM

@JUVEDERM

¡PROGRAME
SU CONSULTA
SOBRE
JUVEDERM®
HOY MISMO!



Información importante sobre los rellenos de gel inyectable JUVÉDERM® (continuación)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento? (Continuación)

Para notificar un efecto secundario con cualquier producto de la colección JUVÉDERM®, llame al Departamento de apoyo de productos de Allergan® al 1-877-345-5372. Visite también Juvederm.com o hable con su médico para obtener más información.

Los productos de la colección JUVÉDERM® solo están disponibles por parte de un médico o profesional debidamente autorizado.

Indicaciones cosméticas de BOTOX®

BOTOX® Cosmetic (onabotulinumtoxinA) es un medicamento con receta que se inyecta en los músculos y se utiliza para mejorar temporalmente el aspecto de las líneas de expresión de la frente, las patas de gallo, las líneas de expresión del entrecejo y líneas verticales que conectan el cuello y la mandíbula (bandas platismales) de moderadas a graves en adultos.

Información importante de seguridad

Hable con su médico sobre BOTOX® Cosmetic y si es adecuado para usted. Existen riesgos con este producto: los efectos de BOTOX® Cosmetic pueden diseminarse de horas a semanas después de la inyección y provocar síntomas graves. Avísele a su médico de inmediato, ya que la dificultad al tragar, hablar, respirar, problemas oculares o debilidad muscular pueden ser signos de una afección potencialmente mortal. Si esto sucede, no conduzca un automóvil, no utilice maquinaria ni realice otras actividades peligrosas. Los pacientes que hayan tenido estas afecciones antes de la inyección tienen el mayor riesgo. Los problemas para tragar pueden durar varios meses. Los efectos secundarios pueden incluir reacciones alérgicas, dolor en el cuello y el lugar de inyección, fatiga y dolor de cabeza.

No reciba BOTOX® Cosmetic si hay una infección cutánea. Informe a su médico sus antecedentes médicos, afecciones musculares o nerviosas y medicamentos, incluidas las toxinas botulínicas, ya que estos pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios graves.



Escanee para ver la información de prescripción completa de BOTOX® Cosmetic, incluido el recuadro de advertencia y la guía del medicamento.

**Allergan
Aesthetics**
an AbbVie company

© 2026 AbbVie. Todos los derechos reservados. JUVÉDERM y su diseño son marcas comerciales de Allergan Holdings France SAS, una compañía de AbbVie, o sus filiales. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. US-FA-03123 01/26 030584